

製品仕様

おむみんグローブ

するりん 2枚1組

定 価 3,850円(税込)

品 番 OG-25

サイズ 幅21cm×長59cm


素 材 ナイロン(袖:ポリエステル)

おむみんグローブ

するりん

-SURURIN-

からだの移動や
体位変換などのケアに

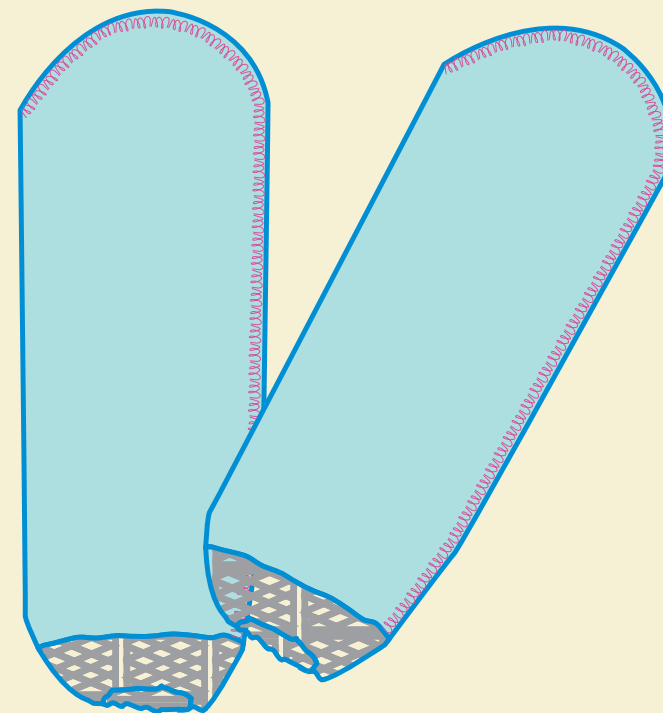

おむみんグローブ

するりん
-SURURIN-



注意事項・お手入れ方法

【注意事項】

- △火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。
- △使用後は人が動作をする場所に放置しないでください。転倒などの事故の原因になります。
- △するりんを装着したまま人を持ち上げるなどの行為は行わないでください。
- △本来の目的以外に使用しないでください。

【お手入れ方法】

< 洗濯 >

- ・家庭用洗濯機をご使用頂けます。温水で行う場合は40℃以下で行ってください。
- ・乾燥機は使用しないでください。

< 消毒 >

- ・消毒液やアルコールを布に染み込ませてふき取ってください。
- ・次亜塩素酸ナトリウムは使用方法・注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。

※高濃度や高温の酸素系洗剤を使用した場合、色落ちや機能を損なう恐れがありますので必ずメーカー指定の希釈倍率および温度をお守りください。

- ・オートクレーブでの消毒はおやめください。

◆販売店

◆製造元



株式会社 **オムニ** 商会
<http://omuni.co.jp/>

〒069-0210 北海道空知郡南幌町南10線西14番地
TEL: 011-378-7080 FAX: 011-378-7081

人の身体が背上げや体位変換で動くとき…

必ず"圧"と"ズレ"が発生します。

この"圧"と"ズレ"が身体にかかり続けると、とても苦痛です。

場合によっては褥瘡(床ずれ)の原因となる可能性があります。

するりんで圧やズレを取り除くことで、ケアをされる方が安楽に暮らせる

ことはもちろんケアをする方の負担の軽減や、腰痛予防にもなります。

ケアを行う際は、声かけをしながらゆっくりと身体等をなでることで

心身ともに快適な療養生活を送ることができます

背抜き・圧抜きに



◁ 背上げ・下げを行った後、
マットと身体の間を手を入れ
優しくなでます。
上げた際は腰から上に、
下げた際は頭側から腰へなでると
違和感を感じにくくなります。

臀部に差し込む際は▷
腕をまっすぐに固定して
上半身を使って押し込みます



◁ 体位変換を行い、クッションの
当て方が変わったときは、
身体とクッションの間をなでます。
また、クッションとマットの間も
なでてあげると身体とクッションが
なじみ、安楽な姿勢になります。

するりんの使いかた



△
するりんは腕にはめて使います。肩甲骨や仙骨など体重がかかる部位は
揃えた腕の中心に、体重がかかる場所を乗せて使用します。

身体の移動に



◁ 両腕に**するりん**を装着し
揃えた手の平の中心に肩甲骨や
仙骨など体重のかかる場所が
乗るように差し込みます。

身体を移動させる際▷
2人で同時に身体を手前に引くなど
"持ち上げない"工夫をすることで
筋緊張の予防につながります



◁ また、差し込んだ状態でケアする方の
落としていた腰を上にあげるだけで
ケアされる方の姿勢を
簡単にくるりん！と変えることが
でき、両者の負担軽減になります。